

Episcissors-60


Den første saks designet for å gi en nøyaktig mediolateral episiotomi

Når episiotomi utføres, anbefales det å bruke den mediolaterale teknikken med fokus på å oppnå en nøyaktig vinkel på 60° bort fra midtlinjen når perineum er utspent. I dag betyr dette at man klipper på øyemål.

Episcissors-60 er en vinklet saks med retningsguide. Når retningsguiden peker mot endetarmsåpningen, vil man få et kontrollert klipp på 60°.

Etter suturering av episiotomien vil vinkelen på klippet være 43°. Dette gir mindre fare for perinealruptur som resulterer i analsfinkterskade.


To studier fra England viser nesten 20% reduksjon i sfinkterskader når man bruker Episcissors-60 i stedet for en tradisjonell saks.

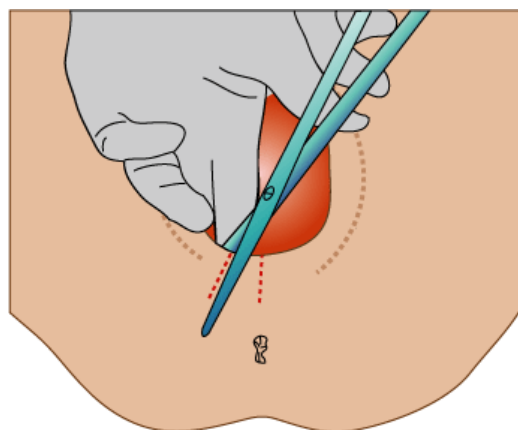

Episiotomisaks uten retningsguide og klipp på øyemål



EPISCISSORS-60 med retningsguide

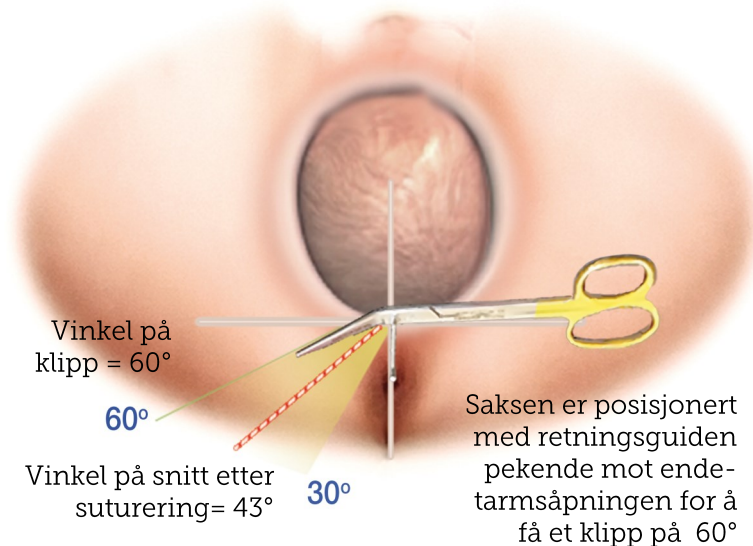

Bestillinginformasjon

Episcissors-60 vinklet saks m/retningsguide

Artikkelnr.

EPISCISSORS-60

Antall

1 stk

