

## BRUK

Deculeg foldes ut og monteres etter anvisningen som er trykt på innsiden, og er deretter klar til bruk.

### Viktige punkter

Som pasient må du være oppmerksom på følgende:

1. Benet er hevet til over hjertehøyde for optimal reduksjon av hevelse,
2. Benet skal være hevet i henhold til legens anvisninger ved konsultasjon,
3. Pasienten bør utføre venepumpeøvelser for å hjelpe blodet med å strømme tilbake til hjertet,
4. Venepumping oppnås ved å bevege foten frem og tilbake i en kontrollert strøm ved å vippe fotleddet.

### Håndtering av produktet

Produktet skal kasseres hvis det er synlig defekt eller ved skader som kan svekke designet.

Når behovet for heving opphører, kastes Deculeg som pappavfall.

Kast produktet etter endt pasientbehandling.

Produktet skal ikke gjenbrukes.



## DECULEG®

## ELEVATION

### Hjelpemiddel til elevasjon

Deculeg er et hjelpemiddel som kan foldes ut til en stabil benstøtte.

Deculeg er enkelt tilgjengelig for pasienter og helsepersonell på sykehuset og i pasientens eget hjem.





## ELEVATION

### Fordeler

- Oppfyller alle hygienekrav - Deculeg kan tilbys alle uavhengig av isolasjonskrav, osv.
- Deculeg er en forhøyet enhet med redusert risiko for trykksår.
- Deculeg kan brukes for ulike pasientkategorier - beinbrudd, armbrudd, hudhøsting i plastisk kirurgi, blokkering i lår, osv.
- Enkel å bruke selv i vanskelige posisjoner, da Deculeg er enkelt bevegelig og kan posisjoneres etter ønske.
- Kan tas med hjem av pasienten, noe som gjør at heving blir enkel og trygg for pasienten hjemme, og dermed tillater korrekt heving hjemme.
- Engangsprodukt med fokus på miljøet.
- Designet slik at hælen er fri. Mykt vev som leggen tar størst trykk, og dermed minimeres risikoen for trykksår.

### Spesifikasjoner

- Veier kun 365 g.
- Ingen tung løfting.
- Tar 15 sekunder å montere.
- Kan lagres som lagerbeholdning på avdelingen - i en dispenser boks med lokk.
- Kan enkelt gjøres komfortabel med hvilken som helst pute.
- CE-godkjent.
- Bedre arbeidsmiljø - ingen tung løfting.
- Kan gjenvinnes etter bruk (laget av 80% resirkulert papir og bare vannbasert maling og lakk).
- Når unfolded har Deculeg en fast høyde som ikke trenger å justeres.

