


TubaVent®


Ballongdilatasjon av
øretrompeten

Kort bruksanvisning

Flergangsutstyr:

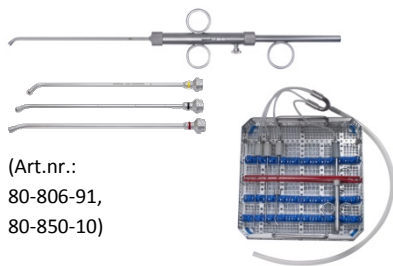

Engangsutstyr:

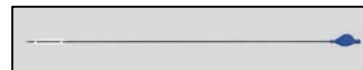


(Art.nr.:
2080-1300320,
2080-9030020)



FORBEREDELSE:



1. Klargjør utstyret før operasjon.

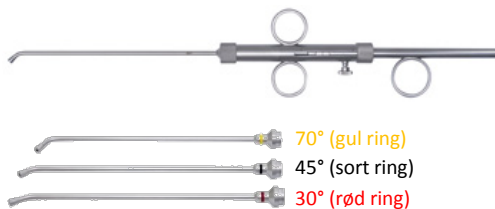

2. Velg innføringsinstrument etter pasientens anatomi. Klargjør instrumentet **i utstrakt posisjon**. Stram låseskruen.



3. Klargjør pumpen ved å åpne låsen, se bildet over hvor «hengelås» er i åpen posisjon (trykket ned mot bruker)



4. Fyll sterilt vann/saltvann ved å **dra** den hvite enden på pumpen mot deg. Tøm eventuelle luftbobler ut av pumpen.




5. Lås pumpen, se bildet over hvor «hengelås» er i låst posisjon (trykket ned mot trykkmåleren). Pumpen er nå klar til bruk.



6. Trekk forsiktig ballongkateteret ut av den hvite plastikkhylsen, fjern også den lille beskyttelsen på ballongen. Tre ballongkateteret forsiktig inn i innføringsinstrumentet. Sjekk at den blå enden sitter godt fast i innføringshylsen.

OPERASJON:

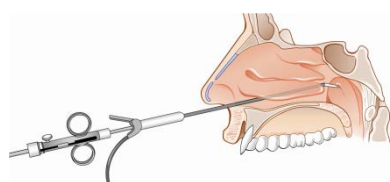

7. Kirurgen plasserer ballongkateteret i øretrompeten til pasienten.

NB! Pumpen kan festes på ballongkateteret enten før eller under operasjon.



8. Når ballongkateteret festes på pumpen **under** operasjon, er ballongkateteret allerede plassert i pasientens øretrompet. Fest nå pumpen på den blå enden av ballongkateteret. Pumpen er igjen festet i innføringsinstrumentet.



9. Med pumpen i låst posisjon, **skru** den hvite enden på pumpen fremover for å fylle ballongkateteret. Pumpen fylles med **10 bar i 2 minutter**.



10. Lås opp pumpen (se trinn 3), og **trekk** ut vesken ved å dra den hvite sylindere mot deg. Kirurgen kan deretter forsiktig fjerne innføringsinstrument med ballongkateter.