

Hurtigmanual for vask og sterilisering – Panetti instrumentsett



Fig. 1



Fig. 2

Fig. 2: Panetti-instrumentene er plassert mellom de blå silikonknottene. Instrumentene er også sikret med rød gummibånd spent over instrumentene.

Fig. 1: Kurv for Panetti instrumentsett, inkludert instrumenter festet i kurven. Instrumentene er tilkoblet slangene med male luer lock for gjennomskylling. Kurven er klar til rengjøring.

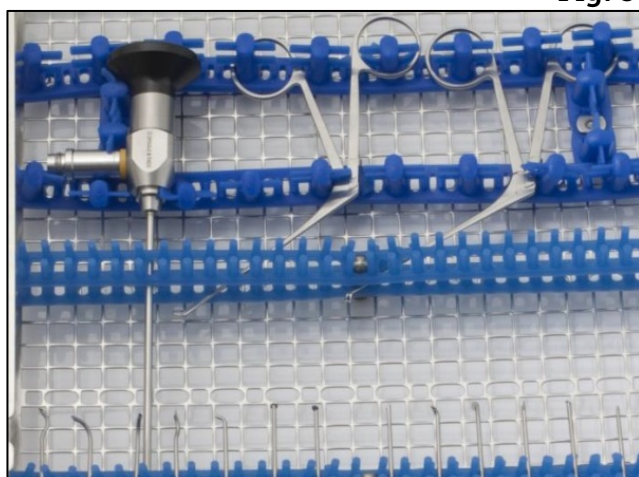


Fig. 3

Fig. 3: Andre instrumenter stabiliseres ved at man fester dem i de blå silikonkrokene som vist med endoskop og mikrotenger i de to øverste radene på bildet.

Legg fremsiden av endoskop slik at den ikke berører kurvveggen for å unngå at optikken tar skade under skylleprosedyren.

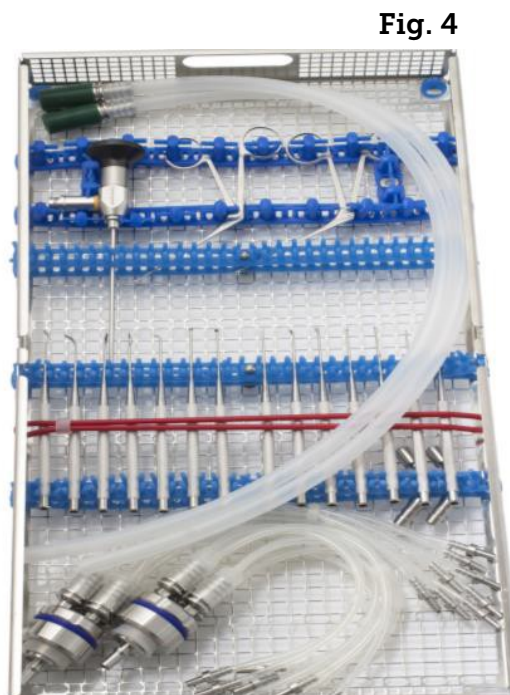


Fig. 4

Fig. 4: Kurv for Panetti-instrumenter klart til sterilisering. Husk å sette på og låse lokket.

Viktig: De to skyllemodulene er koblet fra instrumentene og plassert løst i kurven (nederst på bildet).

Hurtigmanual for skyllemoduler – Panetti instrumentsett

Fig. 5



Fig. 5: Skyllemodulene består av følgende deler:
 [1] øvre funksjonsmodul
 [2] nedre basemodul
 [3] silikon-O-ring
 [4] adaptere for slangene som kobles til Panetti-instrumentene
 [5] adapter for slange som kobles til vaskemaskin

Fig. 6



Fig. 6: Skyllemodul med slanger koblet til øvre funksjonsmodul. Male luer-lock i enden av slangene kobles til Panetti-instrumentene.

Fig. 7



Fig. 7: Tre de to adapterne på nedre basemodul gjennom åpningen (håndtaket) av kurven. Koble deretter slangene på adapteren som går fra nedre basemodul til vaskemaskin. Skyllemodulen vil nå sitte stabilt i åpningen (håndtaket) av kurven.

Fig. 8



Fig. 8: Skyllemodulen består av følgende komponenter:
 [1] Øvre funksjonsmodul
 [2] Nedre basemodul
 [3] Filterdisk
 [4] indre silikonring.

Sjekk at det ikke er smuss på filterdiskene og rengjør dem regelmessig.

Fig. 9



Fig. 9: For å lukke skyllemodulen
 A. Plasser den indre silikonringen oppi den nedre basemodul.
 B. Plasser filterdisken over silikonringen (se Fig. 10).
 C. Skru sammen øvre funksjonsmodul og nedre basemodul. Skyllemodulen skal nå se ut som på Fig. 5.

Fig. 10



Fig. 10: Den nedre basemodul med innlagt filter.

Viktig: 3mach-logoen skal være synlig på toppen av filteret. Det er da lagt inn riktig vei.