


KEBOMED

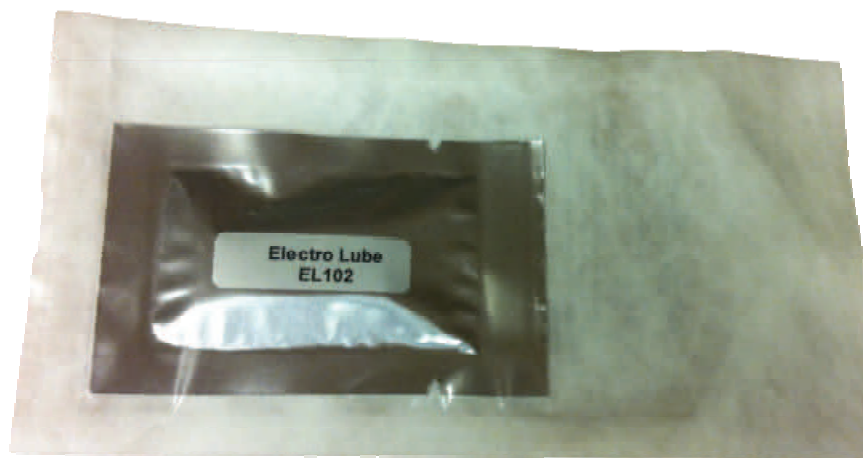

Electro Lube

Anti-stick-middel for diatermiinstrumenter

Electro Lube er et anti-stick-middel som smøres på tenger, sakser og pinsetter til diatermi, og som forhindrer at vev kleber til instrumentet.

Hver pakke Electro Lube inneholder en svamp fuktet med anti-stick-middel. Instrumenter trykkes mot svampen mens tenger klemmes rundt den for å også fukte innsiden. Instrumentet er nå klart til bruk.

Skulle rengjøring likevel være nødvendig, tørk instrumentet med en våt klut. Når det er tørt påføres et nytt lag Electro Lube.

Electro Lube består av ikke-giftige stoffer og er godkjent under FDA-reglene.

Egenskaper:

- Enkel i bruk. Den honningliknende oppløsningen legger seg som en beskyttende hinne på alle diatermi-instrumenter.
- Operasjonstiden reduseres. Man bruker mindre tid på å rengjøre instrumentets spiss, og behøver ikke stoppe arbeidet for å scrape bort vev underveis.
- Pasiensikkerheten økes. Bruk av Electro Lube reduserer blant annet indirekte og periferisk vevsbeskadigelse og muliggjør koagulering i fint vev med større kontroll.

For vareprøver, ta kontakt med oss!



Bestillingsinformasjon	Artikkelnr.	Antall
Electro Lube non-stick-gel	EL102	1 eske á 20 pk

